

# PLASMAPEN

ELETTROCOAGULATORE PORTATILE



 BLUFARMA

*Introduzione alle Quattro Funzioni di Base:*

### **1. Ultima tecnologia**

*Utilizza l'alta tecnologia, attraverso un micro-computer dal controllo sicuro, veloce e compatto*

### **2. Tripla regolazione**

*Sono 3 le modalità di utilizzo per regolare la potenza, per un risultato mirato ed affidabile*

### **3. Tecnologia a Ioni Elettrici**

*Unica tecnologia ionica: l'utilizzo del processo ionico non fa percepire al paziente dolore e non provoca sanguinamento*

### **4. Tipo di Ricaricatura**

*Ricarica compatta, veloce e maneggevole, garantisce un lavoro continuo di circa 5 ore*



## **Utilizzo**

### **Ipercromie:**

Utilizzare la prima potenza. Tenere premuto il tasto "out", utilizzare la parte sottile dell'ago e far apparire le scintille, immediatamente rilasciare il pulsante, quindi usare dei tamponi di cotone per pulire delicatamente la bruciatura nera. La parte sottile dell'ago non brucia tutta la parte, dovrebbe fare 2-3 mm, quindi passare 3-5 mm e continuare. Compresa la posizione del punto di contatto, muovere avanti e indietro lentamente. Si può notare che la melanina con l'agopuntura elettrica si scurisce. Dopodichè la parte scura si stacca e se l'area è molto piccola, può essere rimossa; se una zona è più ampia di pigmentazione e più profonda, deve essere passato 2 o 3 volte per trattare in modo più appropriato, ma prestare attenzione per non causare ustioni durante l'utilizzo.

### **Nei:**

Quando si trattano i nei prestare particolare attenzione a distinguere l'estensione della radice del neo, alcuni nei crescono sullo strato superficiale della pelle ed altri hanno radici profonde. Utilizzare la terza potenza e l'ago grosso per rimuovere il neo profondo. Bruciare un cerchio intorno al bordo del neo fino a bruciarlo e farlo cadere direttamente poi bruciare la radice.

### **Granulomi:**

Usare la prima potenza e gli aghi sottili perforano il granulo di grasso e spremere, oppure carbonizzando i granelli; più la velocità sarà veloce più la riparazione sarà migliore. Se non riesci a spremere il grasso, può anche essere direttamente carbonizzato.

## Tatuaggio:

Se l'area del tatuaggio è grande, utilizzare la terza potenza e l'ago grosso. Non bruciare la parte intera, fare 2-3 mm, quindi passare 3-5 mm e continuare, per ridurre la probabilità di lasciare cicatrici e non trattare una volta, trattare più volte, dopo aver rimosso la crosta e il pigmento nero. Se l'area è grande, usa l'ago grande, il tempo operativo può essere leggermente più lungo; se l'area è troppo grande (più di 3 cm), occorrono molte volte, mai una volta.

## Angiomi, Fibromi, Cheratosi e Verruche:

Usare la prima o la seconda potenza e la punta grande agendo direttamente su tutta la superficie della lesione e carbonizzare; più l'intensità sarà veloce più la riparazione sarà migliore.

## Note:

1. Il trattamento con questa attrezzatura per le prime volte si suggerisce con la pelle animale fresca. Quando si ha piena familiarità con le prestazioni e il funzionamento dell'apparecchiatura, si può procedere con il trattamento sulla cute.
2. A causa dell'effetto coagulante, l'apparecchio può produrre alte temperature in un solo istante. Quando non in uso, si prega di conservare correttamente ed attentamente e tenere lontano dai bambini.
3. Quando la crosta provoca prurito (fase di carne tenera), non cercare di rimuoverla. Dopo 20-30 giorni la crosta cadrà da sola.
4. Il periodo di recupero della cute è di circa 3 mesi. Il pigmento della pelle si concentrerà sotto le croste, scabbatura del pigmento nella pelle e le croste cadono senza infezione.
5. Se per lungo tempo non si utilizza l'apparecchio, è necessario caricare ogni tre o quattro mesi per mantenere più a lungo la vita della batteria.
6. Se si verifica l'errore del dispositivo, si prega di non aprire cercando di riparare al fine di evitare rischi, suggerire di contattare la manutenzione originale della fabbrica.
7. È severamente vietato bagnare o pulire direttamente l'apparecchio, ed evitare l'utilizzo con detergenti liquidi in quanto all'interno si possono verificare danni o situazioni di pericolo.

Lentigo Solare



Fibroma pendulo



Granuloma



Cheratosi



Angioma



Verruca



MATERIALE AD USO ESCLUSIVAMENTE INTERNO PER TESTARE L'EFFICACIA DEI PRODOTTI